

POUČENÍ – ANEB JAK VŠE UDĚLAT SPRÁVNĚ?

MÁTE PŘEPRAVNÍ BOX A ODBĚROVOU SADU?

- Pokud ne - získajte sadu pro odběr a přepravu krve **vyplnění on-line objednávkového formuláře**, nebo **na telefonním čísle +420 724 748 308**, nebo **na emailu: info@prenatalsafe.cz**.
- V sadě najdete Žádanku, Informovaný souhlas, toto Poučení a Složenku pro platbu

OBJEDNEJTE PACIENTKU! OBJEDNEJTE KURÝRA!

- Objednejte pacientku na ideální termín. Nejlépe den před plánovaným odběrem krve objednejte na danou hodinu kurýra, který si od Vás přebere zásilku s odebranou krví. Pokud k odběru došlo neplánovaně, objednejte kurýra ihned ještě na tentýž den, nejpozději na dopoledne dne následujícího.
- Kurýra objednáte zavoláním na číslo **800 311 000**
- Nahlaste místo a čas, kde a kdy chcete zásilku odeslat a nahlaste tzv. firemní číslo, na které budou účtovány veškeré poplatky: **62060**
- Pokud si nevíte rady, rádi Vám pomůžeme.

ZKONTROLUJTE PLATBU!

- Předajte pacientce poučení o platbě. Platba může proběhnout přiloženou složenou, bankovním převodem, nebo vložení na účet.
- Cena testu **PrenatalSafe 5** je 12 500 Kč / 450 EUR za standardní test. Test **PrenatalSafe Plus**, který navíc testuje chromozomy 9 a 16 a mikrodelece stojí 14 500 Kč / 530 EUR. **PrenatalSafe KARYO** je nabízen za 19 900 Kč / 730 EUR. **PrenatalSafe KARYO Plus** pak za 22 900 Kč / 850 EUR.
- Před odběrem krve zkontrolujte platbu pacientky! Pacientka buďto ukáže ústřížek z pošty nebo vytisknutý či vyfocený zaplacený bankovní příkaz nebo potvrzení o vložení peněz na účet.

PŘEČTENÍ A PODEPSÁNÍ INFORMOVANÉHO SOUHLASU!

- Nechte pacientku přečíst informovaný souhlas, zodpovězte případné otázky. Požádejte ji o podpis souhlasu. **Zkontrolujte! Podpis je nezbytný pro provedení testu!**


VYPLŇTE S PACIENTKOU ŽÁDANKU

- Vyplňte společně s pacientkou „**Žádost o vyšetření**“.
- Pamatujte, že pacientka si může vybrat, zda chce znát pohlaví dítěte. Také si může vybrat z několika variant testu:
 - **PrenatalSafe 5** (chromozomy 21, 18, 13, X a Y)
 - s variantou FAST - tedy rychlý výsledek

- **PrenatalSafe Plus** (PrenatalSafe 5 + testování mikrodelecí + chr. 9 a 16)
 - S variantou STANDART (výsledek do 7 pracovních dní)
- **PrenatalSafe KARYO (testování početních a strukturních aberací všech chr.)**
 - S variantou FAST (výsledek do 3-5 pracovních dní)
- **PrenatalSafe KARYO Plus (spojení testu KARYO a Plus)**
 - S variantou STANDART. **Nutné odebrat 2 zkumavky krve!!!**
- Požádejte pacientku, aby žádanku podepsala. Zkontrolujte podpisy. Podpis tohoto dokumentu je nezbytný pro provedení testování na odebraném vzorku krve.

ODEBERTE KREV

- Z červeného přepravního boxu s šedým víčkem vyjměte zkumavku s nápisem „NIPT Tube“.
- Na etiketu zkumavky napište jméno a příjmení pacientky a její datum narození.
- Odeberte do zkumavky 8-10 ml periferní krve tak aby byla zkumavka téměř plná
- **Pro test PrenatalSafe KARYO Plus je nutné odebrat 2 zkumavky krve**
- Zkumavku 5-10 krát promíchejte (dnem vzhůru a zase zpět).
- **Udržujte zkumavky při pokojové teplotě, nikdy neskladujte zkumavky v lednici nebo v mrazáku!**

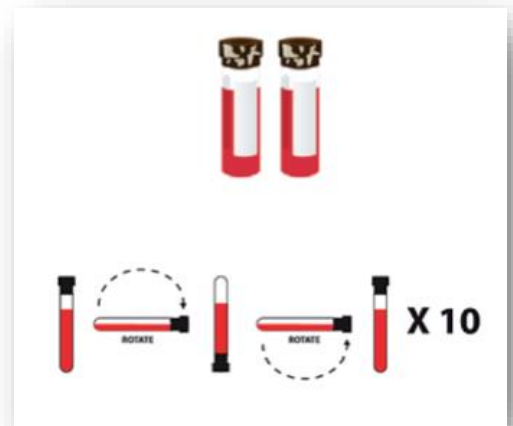

UZAVŘETE BOX A ODEŠLETE KURÝREM

- Vložte zkumavku krve do červené přepravní nádoby. Umístěte zkumavku do jedné ze štěrbin a uzavřete nádobu šedým plastovým víčkem.
- Tuto nádobu vložte kartonové krabice s logem PrenatalSafe®.
- Vložte podepsané dokumenty do této krabice. Krabici zavřete a vyčkejte na kurýra.
- Předějte kurýrovi box a vyplňte s ním přepravní list.
- Firemní číslo je **62060**.
- Doručovací adresa je: **Laboratorio GENOMA, tel: +39 06 88 11 270, Via Di Castel Giubileo 11, Roma 00138, Italy**

Vždy skladujte odebranou krev při pokojové teplotě do té doby, než je vzorek odvezen. Krev nesmí být nikdy chlazená nebo zmrazená!!!

ODEŠLETE INFORMACI O ODBĚRU A VYČEKJTE NA VÝSLEDEK

- Na info@prenatalsafe.cz zašlete informaci o odeslání vzorku připojte informace 1)jméno pacientky 2)rodné číslo 3)datum odběru 4)číslo zásilky (naleznete na tracklistu přepravce)
- Do 3-7 pracovních dnů od obdržení vzorku laboratoří Vám budou zaslány výsledky.